

ELEKTROKARDİYOGRAFI (EKG) CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1.AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.


2.KAPSAM: Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde kullanılan elektrokardiyografi cihazını kapsar.

3.SORUMLULAR:

- Aile Hekimi
- Eğitim Aile Sağlığı Elemanı
-

4.UYGULAMA:

- Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
- EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.
- Hasta sırt üstü yatırılır üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır (küpe, yüzük, saat vb).
- Elektrotlar aşağıdaki şekilde bağlanır:

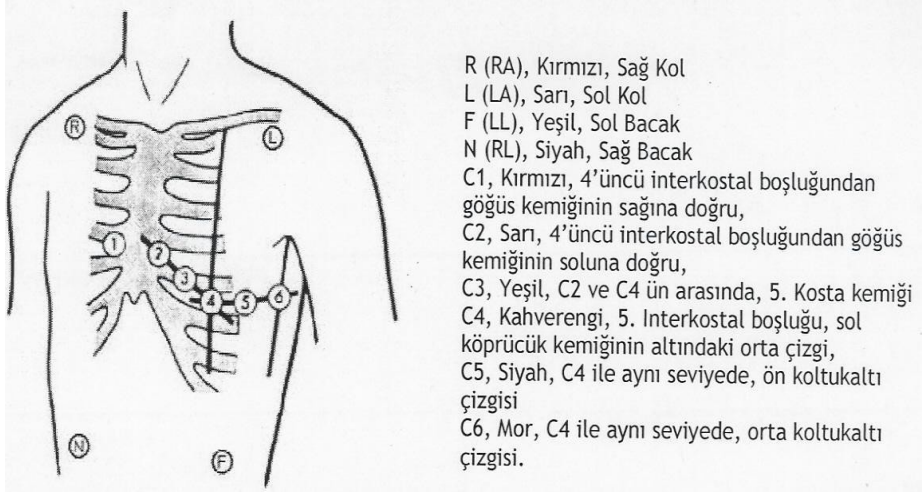

- Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.
- Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.
- İşlem bittiğinde elektrotlar hastadan sökülür.
- EKG kabloları dairesel olarak toplanır.
- Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.
- EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.
- Günlük olarak, sarj olup olmadığı açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.