

ASPIRATÖR CİHAZI BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

1.0 CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- Aspire edilmesi gereken hastalar (havale nöbetinde olan hastalar, mental motor retarde olanlar, zehirlenme vakaları vb.)

2.0 SORUMLULAR

- Aile hekimi ve Eğitim Aile Sağlığı Elemanı

3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Bakım yapımında cihazın enerjisi kesilir, bakım bittikten sonra kontrollü olarak enerjisi verilir.

4.0 KULLANIMI

- Cihaz hasta yanına getirilir.
- Düz bir zemine konur ve fişi takılır.
- Steril aspirasyon sondası takılır.
- Cihaz, sonda; burun veya ağızdan ilerledikten sonra düğmesine basılıp çalıştırılır.
- Aspirasyon işlemi bitince sonda çıkarılır.
- Aspiratör kapatılır, fişi çekilir.
- Aspirasyon sondası atılır.
- Cihaz yerine yerleştirilir.

5.0 BAKIMI

- Cihazın parçaları temizlenir,dezenfeksiyonu yapılır.